


# DETECTOR DE ALCOHOL CA 2000

*Este manual es parte inseparable del aparato por lo que debe estar disponible a todos los usuarios del equipo. Le recomendamos leer atentamente el presente manual y seguir rigurosamente los procedimientos de uso para obtener las máximas prestaciones y una mayor duración del mismo.*

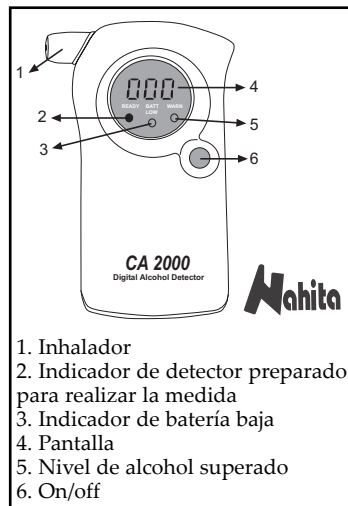

1. Inhalador
2. Indicador de detector preparado para realizar la medida
3. Indicador de batería baja
4. Pantalla
5. Nivel de alcohol superado
6. On/off

## Procedimiento de uso

- Encienda el detector pulsando el botón de encendido ON/OFF. Aparece en pantalla "200" y va descendiendo progresivamente hasta "000". Durante este tiempo al detector realiza un control interno en el sensor y circuito con el fin de prepararlos para el test. Cuando escuche un sonido intermitente y se encienda la luz Ready el lector estará preparado para medir.

- Sople de forma continua por la boquilla hasta escuchar el sonido intermitente. Después de soplar la luz roja y verde se encienden de forma simultánea durante 4 segundos. El resultado obtenido es en **unidades BAC** (% de alcohol en sangre), que se muestra con tres dígitos durante 15 segundos. Si el BAC son 0.05% la lámpara roja se encenderá y sonará la alarma.

- Finalmente en pantalla aparecerá "OFF" y se apagará el detector.
- Para sucesivos test, realice los dos primeros pasos.

## Especificaciones Técnicas

<i>Dimensiones</i>	120 x 60 x 25 mm
<i>Peso</i>	200 g
<i>Fuente de energía</i>	Pila alcalina de 9V
<i>Sensor</i>	De óxido-semiconductor
<i>Tiempo de respuesta</i>	4 segundos
<i>Temperatura de operación</i>	10-40°C
<i>Precisión</i>	±0.01%-0.10% BAC
<i>Adaptador para la batería del coche</i>	

## Recomendaciones

- Lea previamente las instrucciones.
- No realizar el test en ambientes contaminados.
- No sople humo de tabaco ni líquidos, dañaría el sensor.
- Reemplace la batería cuando esté baja (se encenderá el piloto *Bat Low*).
- Después de beber realice el test pasados 20 minutos.

## **GARANTÍA**

AUXILAB S.L. garantiza este equipo por un período de doce meses a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación que afecte a su funcionamiento, comprometiéndose a reponer las piezas cuya rotura, se deba a defecto de fabricación. El canje, durante el período de garantía, de estas piezas será gratuito y no implicará prolongación de la misma.

Esta garantía quedará sin efecto cuando el aparato haya sido sometido a un uso indebido o manipulado por persona ajena a nuestro Servicio Oficial, así como por haber sido instalado incorrectamente o por haber utilizado recambios y accesorios no originales. Quedan, asimismo, excluidas de la garantía las averías producidas por causas catastróficas (fuego, inundación...), atmosféricas, golpes y caídas.

Los gastos ocasionados como consecuencia de esta reparación, tales como el transporte de los aparatos a nuestros Servicios Oficiales y su posterior devolución, serán por cuenta del usuario.

Es necesaria la presentación del Certificado de Garantía debidamente cumplimentado (sin enmiendas ni tachaduras), para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Oficial sin cargo durante el período indicado. Esta garantía no cubre ni el mantenimiento del aparato ni las piezas o los daños producidos por desgaste natural del uso normal del equipo.



**Auxilab SL**

Polígono Morea Norte 8 · 31191 BERIAIN (Navarra) · Tel 948 310 513 · Fax 948 310 500 · 948 312 071  
e-mail: asistencia@auxilab.com · <http://www.auxilab.es>