

**1. Instrucciones de uso:**

(1) Elegir el rollo de esterilización adecuado según el tamaño de los artículos a esterilizar. A continuación, introducir los artículos limpios y secos en el rollo de esterilización. Los artículos esterilizados no deben exceder 3/4 de la longitud de la bolsa de esterilización, a fin de garantizar un sellado adecuado, de lo contrario la bolsa puede reventar.

(2) El instrumento debe introducirse con la punta en la dirección opuesta con el lado de pegado para garantizar la seguridad.

(3) Selle de la bolsa de esterilización con la máquina de sellado, marcando el tiempo de esterilización, el contenido y la información de uso.

(4) Sellar con el lado transparente hacia abajo La temperatura de sellado entre 200-230°C, la presión de 0,15kg/cm<sup>2</sup> y el tiempo de duración es de 4-6S.

(5) A continuación, poner los artículos en el autoclave o esterilizador de óxido de etileno.

(6) Compruebe el proceso de cambio de color de la marca indicadora: Antes de la esterilización por vapor, el color es azul, cambiará a marrón después de la esterilización. Antes de la esterilización por EO, el color es rojo, cambiará a amarillo después de esterilizar.

(7) Coloque la bolsa una vez esterilizada en un lugar seco, oscuro y limpio para su almacenamiento, en espera de uso.

(8) Despegue la bolsa en la dirección indicada cuando la utilice y, a continuación, extraiga los artículos.

**2. Sugestión**

(1) Tras la esterilización, la bolsa debe guardarse en un lugar adecuado. Podrá ser utilizada en los 6 meses posteriores a la esterilización por vapor y en 24 meses después de la esterilización por EO.

(2) Compruebe la bolsa de esterilización antes de usarla. No utilizar si el envase está dañado.