

**Nombre:** Bolsas esterilización autoadhesivas

**Características:** Fabricado con una cara de papel de uso médico y la otra de un film laminado de uso médico

La bolsa tiene la función de barrera bacteriana, es fácil de usar y no se contamina después de la esterilización.

**Aplicación:** Hospital, Veterinario, Dental, Tatuaje, etc.

**Métodos de esterilización:** Vapor, EO y FORM

**Instrucciones:**

1. Introduzca el artículo en la bolsa, despegue la tira de la banda adhesiva, doble por la línea de puntos y presione.

2. Esterilización:

2.1. Esterilización por vapor (autoclave):

Mantenga durante 20-30min a 121°C

Esterilice durante 4min a 132°C

El volumen del artículo debe suponer entre el 5%-80% de la bolsa

2.2. Esterilización por óxido de etileno EO:

Concentración del óxido de etileno: 800~1000mg/L, temperatura entre 55°C~60°C,

Humedad relativa entre 60%~80%, esterilizar durante 6 horas.

3. Después de la esterilización, si el indicador cambia

Cuando el color del indicador de esterilización cambia (cuando se procesa con EO, la flecha se vuelve amarilla, cuando se esteriliza con vapor, la flecha se vuelve marrón), indica que la esterilización ha finalizado.

4. Despegue la bolsa de la parte superior y saque los artículos.

**!Atención;**

La bolsa es un producto de un solo uso. Destruyala después de usarla.

1. Una vez esterilizada, abra la bolsa, puede usar el instrumento.

2. No utilizar si el embalaje está dañado.

3. No utilizar si el papel está roto.

4. El tiempo máximo de validez es de 6 meses después de la esterilización. Vuelva a embalarlo y esterilícelo cuando hayan transcurrido más de 6 meses.