

Nom : Sachets de stérilisation auto-adhésifs

Caractéristiques : Fabriqué avec une face de papier médical et l'autre face d'un film médical laminé.

La poche a une fonction de barrière bactérienne, est facile à utiliser et ne se contamine pas après la stérilisation.

Application : hôpital, vétérinaire, dentaire, tatouage, etc.

Méthodes de stérilisation : vapeur, OE et FORM

Instructions :

1. Insérez l'article dans le sac, décollez la bande adhésive, pliez le long de la ligne pointillée et pressez.

2. Stérilisation :

2.1. Stérilisation à la vapeur (autoclave) :

maintenir pendant 20-30 minutes à 121°C

Stériliser pendant 4 minutes à 132°C

Le volume de l'article doit être compris entre 5 % et 80 % du sac.

2.2. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène EO :

Concentration d'oxyde d'éthylène : 800 ~ 1000mg/L, température entre 55° C ~ 60° C, humidité relative entre 60%~80%, stériliser pendant 6 heures.

3. Après la stérilisation, si l'indicateur change

Le changement de couleur de l'indicateur de stérilisation (lors du traitement à l'OE, la flèche devient jaune, lors de la stérilisation à la vapeur, la flèche devient brune) indique que la stérilisation est terminée.

4. Détachez le sac par le haut et retirez les articles.

Attention !

Le sac est un produit à usage unique. Détruisez-le après usage.

1. Une fois stérilisé, ouvrez le sachet, vous pouvez utiliser l'instrument.
2. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
3. Ne pas utiliser si le papier est déchiré.
4. La durée de conservation maximale est de 6 mois après la stérilisation.
Reconditionner et stériliser après plus de 6 mois.